

CLEANISEPT WIPES MAXI

PANNI ALCOHOL-FREE PER UNA RAPIDA DISINFEZIONE

Alcohol free
Aldeide e fenolo free
Dermatologicamente testato
Soluzione disinfettante

PROPRIETA' DEL PRODOTTO:

Adatto a pulire e disinfettare i dispositivi medici sensibili all'alcol come quelli ad ultrasuoni, le testine delle sonde per gli esami vaginali e addominali.

La formula del disinfettante è basata sui composti di ammonio quaternario. La soluzione disinfettante delle Cleanisept Wipes è senza alcool e non contiene aldeide né fenoli.

Le salviette CLEANISEPT WIPES sono studiate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni costruite dalla PHILIPS, SHIMADZU, SONOACE, ALOKA, GE e SIEMENS.

GAMMA DI APPLICAZIONE:

Disinfezione e pulizia dei dispositivi medici sensibili all'alcol come le testine delle sonde a ultrasuoni per esami vaginali e addominali.



APPLICAZIONE:

Pulire accuratamente le superfici dei dispositivi e lasciare agire la soluzione per almeno 1 min. Se necessario si prega di strofinare la superficie con un panno monouso dopo la scadenza del tempo di esposizione. Se si usa per la pulizia e la disinfezione delle testine degli strumenti ad ultrasuoni si consiglia innanzitutto di strofinare la testina una volta al giorno con un panno inzuppato di disinfettante monouso. Di base, le testine degli strumenti ad ultrasuoni devono essere disinfettate con le CLEANISEPT WIPES prima di ogni applicazione.

Le CLEANISEPT WIPES sono pronte per l'uso e si strappano ad una ad una dall'apposito sistema. Aprire la ricarica ed introdurla nell'apposito contenitore, inserire la prima salvietta e farla passare dal foro a lamelle.

PROPRIETA' ANTIMICROBICHE:

Le CLEANISEPT WIPES esercitano un'azione:

- BATTERICIDA (incl.MRSA=multi stafilococco aureo resistente)
- FUNGICIDA
- INATTIVAZIONE DEI VIRUS (virus dell'epatite B, l'HIV, epatite C virus, virus turno, papova/polyoma virus)

Tempo di applicazione per l'abbattimento di batteri e funghi, nonché del virus dell'epatite B, HIV, epatite C virus e rota virus: 1 min.

Tempo di applicazione per l'abbattimento di papova/polyoma virus: 5 min.

COMPOSIZIONE:

100gr. CLEANISEPT SOLUTION (7,5%) contiene ingredienti attivi:

0,25gr. Didecylmethylammoniumchlorid

0,25gr. Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid

0,25gr. Alkylethylbenzyltrimethylammoniumchlorid

Contenuto: 1 pacchetto contenente 80 salviette (20x22cm), saturato con 100 gr. di soluzione disinfettante CLEANISEPT.

VALIDITA' DEL PRODOTTO:

Tre anni dalla data di fabbricazione

INFORMAZIONI SUI RISCHI:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente.

Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso.

UNITA':**confezionamento**

1 confezione da 6 buste da 100 salviette

codice

00-208-T100

CND: D99**N. REPERTORIO: 147550**

DISTRIBUITO DA:

**CRESPI ENTERPRISE S.N.C.****MEDICAL MARKETING**

Sede Operativa : Viale Scarampo, 41 -20148 Milano
Tel. +39 02 4004 4285 Cell.+39 346 51 38 125 Fax +39 02 4550 9883
e-mail: crespi@crespienterprise.it pec: crespienterprise@pec.netorange.it